

# Vejledning

## PHE Air Pillow - Ergonomisk luftpude

Puden kan medtages og anbringes på en almindelig stol, i sofaen, i bilen, eller hvor der er behov for den.

Puden skal vende med lynlåsen bagud.

For enden af slangen sidder der en trykknop.

Når man sidder på puden, kan man lukke luft ud af puden, ved tryk på knappen. Luk den mængde luft ud, der gør, at du sidder behageligt.

Ønsker man at få mere luft i puden, rejser man sig, så der ikke er belastning på puden, og trykker på samme knap. Puden vil nu automatisk suge luft ind.

Betrækket er syet i stof LIDO - 100% polyester. Kan vaskes ved 30 grader. Der kan tilkøbes nyt betræk.

		
<p>Sådan ser indlægget ud, der er i puden.</p>	<p>PHE Air Pillow - sådan ser den ergonomiske luftpude ud</p>	<p>Fås i mange farver</p>

Ved spørgsmål, kontakt os på mail eller tlf.

**Egholm Skind ApS, Lundagervej 100C, 8722 Hedensted**

(tæt på Hedensted motorvejsafkørslen )

[www.egholm-skind.dk](http://www.egholm-skind.dk) e-Mail: [salg@egholm-skind.dk](mailto:salg@egholm-skind.dk) Tlf: 75 89 34 10